



Інструкція щодо застосування медичного виробу

Пластир першої медичної допомоги

Опис

Універсальні набори пластирів з подушечкою на тканинній, полімерній, нетканій основі широкого спектру використання. Форма випуску стріп.

Показання для використання

Призначений для фіксації пошкоджених пальців, при наданні першої допомоги в разі дрібних ран, подряпин, порізів.

Спосіб використання:

Перед використанням вийняти пластир з паперового пакету та зняти захисну плівку, після чого подушечкою прикласти до рани, а краї пластиру притиснути до шкіри. Пластир може залишатись на шкірі протягом доби.

Протипоказання

Гіперчутливість до основи пластиру, клеючої речовини.

Побічні реакції

Подразнення шкіри у місці приклеювання.

Застереження

Пластир не можна використовувати на відкритих післяопераційних ранах. В разі появи сильного подразнення пластир необхідно зняти.

Зберігання

Зберігати при температурі від 5°C до 35°C.

Назва та адреса виробника



ТОВ «КАЛИНА МЕДИЧНА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ», 04128, м. Київ, вул. Садова, 16/19, Україна,

Юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Боричів тік, буд. 35А, Україна, Тел./ф: +38044 5019216,
www.kalinagroup.com

Дата випуску інструкції щодо застосування: 02.2016 р.

