

ТОВ «ГІ ЕНД АЙ ПАРТНЕРИ»	Інструкція із застосування медичного виробу «Засіб дезінфекційний для медичних виробів «Квіксепт»	Ред.01	Зміна №0	Стор. 1/4
--------------------------	---	--------	----------	-----------



UA.TR.098



**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Директор ТОВ «ГІ ЕНД АЙ ПАРТНЕРИ»

Володимир ТИШКОВЕЦЬ

«07» лютого 2025 р.

## ІНСТРУКЦІЯ із застосування медичного виробу «Засіб дезінфекційний для медичних виробів «Квіксепт»

### 1 ОПИС МЕДИЧНОГО ВИРОБУ

Медичний виріб «Засіб дезінфекційний для медичних виробів «Квіксепт» (далі за текстом - засіб) являє собою готовий до застосування засіб у вигляді прозорої рідини або кольору використаного барвника із запахом використаної сировини.

### 2 ПРИЗНАЧЕННЯ МЕДИЧНОГО ВИРОБУ

Засіб призначений для швидкої (експрес) дезінфекції невеликих за розміром медичних виробів та поверхонь медичного устаткування: тонометрів, фонендоскопів, термометрів, інструментів, датчиків до апаратів ультразвукової діагностики, рентген-діагностичних систем, обладнання для комп'ютерної, магнітно-резонансної томографії (у випадку, якщо виробник обладнання дозволяє обробку спиртовими засобами) тощо.

### 3 СКЛАД МЕДИЧНОГО ВИРОБУ, ВМІСТ ДІЮЧИХ ТА ДОПОМІЖНИХ РЕЧОВИН, МАС. %

Діючі речовини: спирт етиловий – 72,0 % (об'ємна частка); суміш четвертинних амонійних сполук (амоній, алкіл (C12-C16)диметилбензил-, хлорид – 0,1 %; амоній, дидецилдиметил-, хлорид – 0,03 %) – 0,13 % (масова частка). Допоміжні речовини: вода підготовлена, гліцерин, пантенол, ароматизатор (за вимогою замовника). Крім того за вимогою змовника засіб може містити барвник.

### 4 СПЕКТР АНТИМІКРОБНОЇ ДІЇ

Засіб має широкий спектр дії, а саме: антимікробну активність проти грампозитивних та грамнегативних бактерій (у т.ч. збудників внутрішньо-лікарняних інфекцій, мікобактерій туберкульозу, кишкової палички (*Escherichia coli*), синьогнійної палички (*Ps.aeruginosa*), мультирезистентний стафілокок (MRSA), золотистий стафілокок (*Staphylococcus aureus*), сальмонели, інші антибіотикорезистентні бактерії); вірусів (у т.ч. парентеральні вірусні гепатити, вірус ВІЛ (СНІД), поліовірус, аденовіруси, вірус «пташиного грипу» А (H5N1), парагрипу, SARS, герпесу, атипової пневмонії тощо), патогенних грибів (у т.ч. кандидозів, дерматофітозів, трихофітій). Засіб має пролонговану антимікробну дію протягом 3 годин.

Дата випуску/останнього перегляду інструкції із застосування 05.02.2025 р.

ТОВ «ТІ ЕНД АЙ ПАРТНЕРИ»	Інструкція із застосування медичного виробу «Засіб дезінфекційний для медичних виробів «Квіксепт»	Ред.01	Зміна №0	Стор. 2/4
--------------------------	---	--------	----------	-----------

## 5 ТОКСИЧНІСТЬ ТА БЕЗПЕЧНІСТЬ МЕДИЧНОГО ВИРОБУ

За параметрами гострої токсичності засіб відноситься до 3 класу помірно небезпечних речовин при введенні у шлунок та до 4 класу мало небезпечних речовин. Засіб не має шкіроподразнюючої та сенсibilізуючої дії.

## 6 СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ

Засіб готовий до застосування.

Для зручності використання може комплектуватися розпилювачем або дозуючим пристроєм тощо. Для уникнення ризику перехресного інфікування рекомендовано використання настінних ліктьових дозуючих пристроїв (дозаторів).

**Експрес дезінфекція медичних виробів і поверхонь медичного устаткування** проводиться у випадках нагальної потреби методом протирання або зрошення (за допомогою розпилювача). Норма витрати засобу (25- 40) мл/м<sup>2</sup>. Експозиція – 15 с. *Після завершення обробки засіб не потребує змивання.*

## 7 ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ ПРИ РОБОТІ ІЗ ЗАСОБОМ

**7.1.** Засіб легкозаймистий! Не допускати контакту із відкритим вогнем та включеними нагрівальними електроприладами. При обробці поверхонь способом зрошення рекомендується використовувати засоби індивідуального захисту органів дихання. Гарячим поверхням перед проведенням дезінфекції необхідно дати охолонути.

**7.2.** Використати тільки для зовнішнього застосування.

**7.3.** Не наносити на відкриті рани, уникати попадання на слизові оболонки та в очі.

**7.4.** Після закінчення строку придатності використання засобу забороняється.

## 8 ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ВИПАДКОВОМУ ОТРУЄННІ

**8.1.** **Заходи першої допомоги при попаданні засобу в очі.** При попаданні засобу в очі необхідно промити їх водою протягом 10 - 15 хв і закапати 30 % розчин сульфацилу натрію або аналогічним засобом. За необхідності звернутись до лікаря.

**8.2.** **Заходи першої допомоги при попаданні засобу до шлунку.** При попаданні засобу до шлунку необхідно дати випити потерпілому кілька склянок води кімнатної температури з додаванням сорбенту (10 - 15 подрібнених таблеток активованого вугілля на склянку води), звернутись до лікаря.

## 9 ПАКУВАННЯ. ТРАНСПОРТУВАННЯ. ЗБЕРІГАННЯ

### 9.1 Пакування засобу

Засіб фасують:

– від 0,002 L (л) або kg (кг) до 0,5 L (л) або kg (кг) - у пакети з полімерної плівки («Саше», «Стік», «Стріп» або іншого типу за домовленості зі споживачем), згідно з чинною нормативною документацією, які забезпечують збереження продукції;

– від 0,01 L (л) або kg (кг) до 25 L (л) або kg (кг) - у флакони, туби, пляшки, каністри з полімерних матеріалів, згідно з чинною нормативною документацією, які забезпечують збереження продукції;

– від 50 L (л) або kg (кг) до 200 L (л) або kg (кг) - у бочки з полімерних матеріалів, згідно з чинною нормативною документацією, які забезпечують збереження продукції.

### 9.2 Умови транспортування

Засіб транспортують всіма видами транспорту згідно з правилами перевезення відповідної категорії вантажів, що діють на даному виді транспорту.

<b>ТОВ «ТІ ЕНД АЙ ПАРТНЕРИ»</b>	<b>Інструкція із застосування медичного виробу «Засіб дезінфекційний для медичних виробів «Квіксепт»</b>	<b>Ред.01</b>	<b>Зміна №0</b>	<b>Стор. 3/4</b>
---------------------------------	--	---------------	-----------------	------------------

### 9.3 Строки та умови зберігання

Строк придатності засобу та гарантійний строк зберігання – 5 років з дати виготовлення. Зберігати в упаковці виробника, окремо від ліків, у недоступному для дітей місці, за температури від мінус 40 °С до плюс 35 °С на безпечній відстані від нагрівальних приладів, відкритого вогню та прямих сонячних променів.

**Термін придатності засобу та гарантійний строк зберігання – 5 років з дати виготовлення.**

### 10 ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

За показниками якості засіб повинен відповідати вимогам, вказаним в таблиці 1.

**Таблиця 1.** Органолептичні та фізико-хімічні показники засобу

Назва показника	Характеристика і норма
Зовнішній вигляд, колір	Прозора рідина, колір відповідно до використаного барвника
Запах	Використаної сировини або ароматизатора
Об'ємна частка етилового спирту, %	72,0 ± 2,0
Масова частка суміші ЧАС, %	0,13 ± 0,01

### 11 ТЛУМАЧЕННЯ СИМВОЛІВ МАРКУВАННЯ

Символ	Назва	Символ	Назва
	Знак відповідності технічним регламентам з ідентифікаційним номером органу з оцінки відповідності		Ознайомитись з інструкцією із застосування
	Виробник		Увага! Дивись супровідну документацію
	Код партії		Обмеження температури
	Дата виготовлення		Берегти від прямих сонячних променів та нагрівання
	Використати до		Оберегти від вологи
	Легкозаймиста речовина		Увага! Подразлива речовина

### 12 ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

12.1 Додатково до призначеного використання можливе використання засобу «Квіксепт» для:

Дата випуску/останнього перегляду інструкції із застосування 05.02.2025 р.

<b>ТОВ «ТІ ЕНД АЙ ПАРТНЕРИ»</b>	<b>Інструкція із застосування медичного виробу «Засіб дезінфекційний для медичних виробів «Квіксепт»</b>	<b>Ред.01</b>	<b>Зміна №0</b>	<b>Стор. 4/4</b>
---------------------------------	--	---------------	-----------------	------------------

- для просочування серветок одноразового використання для очищення медичних виробів;
- для дезінфекції медичних рукавичок;
- для швидкої (експрес) дезінфекції невеликих за розміром, важкодоступних для обробки об'єктів в закладах охорони здоров'я.

**12.2 Експрес дезінфекція поверхонь медичних виробів, устаткування, рукавичок** проводиться у випадках нагальної потреби методом протирання або зрошення (за допомогою розпилювача). Норма витрати засобу (25- 40) мл/м<sup>2</sup>. Експозиція – 15 с.

*\* Після завершення обробки засіб не потребує змивання.*

### **ВИРОБНИК**

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТІ ЕНД АЙ ПАРТНЕРИ»

Код ЄДРПОУ 36758388

Юридична адреса: 01135, Україна, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 8, кімната 22.

e-mail: [tov.tandi@i.ua](mailto:tov.tandi@i.ua)

тел.: +38 (050) 499-75-86

[www.mdmgroupp.com.ua](http://www.mdmgroupp.com.ua)

**Адреса потужностей виробництва:** Україна, 08062, Київська обл., Бучанський р-н, с. Вітрівка, вул. Перемоги, 2.