

ТОВ «ТІ ЕНД АЙ ПАРТНЕРИ»	Інструкція із застосування медичного виробу «Засіб дезінфекційний для медичних виробів «Медіоцид»	Ред.01	Зміна №0	Стор. 1/4
--------------------------	---	--------	----------	-----------



UA.TR.098



ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ТОВ «ТІ ЕНД АЙ ПАРТНЕРИ»

Володимир ТИШКОВЕЦЬ

«05» лютого 2025 р.

ІНСТРУКЦІЯ із застосування медичного виробу «Засіб дезінфекційний для медичних виробів «Медіоцид»

1 ОПИС МЕДИЧНОГО ВИРОБУ

Медичний виріб «Засіб дезінфекційний для медичних виробів «Медіоцид» (далі за текстом - засіб) являє собою готовий до застосування засіб у вигляді безбарвної прозорої рідини із запахом використаної сировини. Засіб не пошкоджує об'єкти із металу, скла, гуми, полімерних матеріалів, за винятком чутливих до спиртів (поверхні, пофарбовані низькосортною фарбою, покриті лаком, виготовлені з акрилового скла), не фіксує білкові забруднення, не залишає нальоту.

2 ПРИЗНАЧЕННЯ МЕДИЧНОГО ВИРОБУ

Засіб призначений для експрес-дезінфекції медичних виробів, невеликих за площею, а також важкодоступних для обробки поверхонь медичного устаткування (у тому числі дрібних ручних інструментів, що застосовуються в стоматології, наконечників до бормашин, турбін тощо), у вогнищах інфекційних захворювань, закладах охорони здоров'я усіх профілів.

3 СКЛАД МЕДИЧНОГО ВИРОБУ, ВМІСТ ДІЮЧИХ ТА ДОПОМІЖНИХ РЕЧОВИН, МАС. %

Діючі речовини: спирт ізопропіловий – 60%, алкілдиметилбензиламоній хлорид - 0,1%.
Допоміжні речовини: вода підготовлена, ароматизатор.

4 СПЕКТР АНТИМІКРОБНОЇ ДІЇ

Засіб належить до швидкодіючих та має антимікробну активність у відношенні грампозитивних і грамнегативних бактерій (у т.ч. збудників внутрішньолікарняних інфекцій, мікобактерій туберкульозу), вірусів (у т.ч. аденовірусів, вірусів грипу, парагрипу та інших збудників гострих респіраторних інфекцій, «пташиного» грипу, ентеро-, ротавіруси, вірус поліомієліту, віруси ентеральних, парентеральних гепатитів, ВІЛ(СНІД), герпесу, атипової пневмонії) дріждеподібних грибів роду Кандида і дерматофітів.

5 ТОКСИЧНІСТЬ ТА БЕЗПЕЧНІСТЬ МЕДИЧНОГО ВИРОБУ

За параметрами гострої токсичності засіб при введенні в шлунок, при нанесенні на шкіру відноситься до 4 класу мало небезпечних речовин.

Засіб не викликає сенсibiliзуючої та шкіроподразнюючої дії.

Дата випуску/останнього перегляду інструкції із застосування 05.02.2025 р.

ТОВ «ТІ ЕНД АЙ ПАРТНЕРИ»	Інструкція із застосування медичного виробу «Засіб дезінфекційний для медичних виробів «Медіоцид»	Ред.01	Зміна №0	Стор. 2/4
---------------------------------	--	---------------	-----------------	------------------

6 СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ

Засіб готовий до застосування. Для зручності використання можуть комплектуватися курковими розпилювачами-тригерами. Засіб не потребує змивання.

6.1 Засіб застосовують для дезінфекції поверхонь медичних виробів та медичного устаткування, виготовлених із будь-яких матеріалів, за винятком чутливих до дії спиртів: поверхонь, пофарбованих низькосортною фарбою, покритих лаком, виготовлених із акрилового скла.

6.2 Для проведення дезінфекції поверхні протирають ганчір'ям (серветками, ватними тампонами), змоченими у засобі, або рівномірно зрошують засобом за допомогою ручного розпилювача з відстані 30-50 см до повного змочування поверхні.

Норма витрати засобу при протиранні – (70-80) мл засобу на 1 м² поверхні, при зрошуванні - (30-50) мл засобу на 1 м² поверхні.

6.3 Оброблені засобом поверхні медичного устаткування, медичні вироби, що безпосередньо контактують із слизовими оболонками, рекомендується перед використанням промити дистильованою водою, висушити стерильними марлевими серветками.

Дезінфекція проводиться відповідно до режимів, представлених у таблиці 1.

Таблиця 1. Режими дезінфекції об'єктів

Об'єкт знезараження	Вид інфекції	Експозиція, хв.	Спосіб знезараження
Поверхні медичних виробів (у т.ч дрібні ручні інструменти, що застосовують у стоматології, наконечники до бормашин, турбіни тощо), поверхні медичного устаткування, приладів, апаратури	Бактеріальні (виключаючи туберкульоз), вірусні інфекції	0,5	Протирання або зрошування
	Бактеріальні (виключаючи туберкульоз), вірусні інфекції, кандидози, дерматомікози	5,0	

7 ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ ПРИ РОБОТІ ІЗ ЗАСОБОМ

7.1 Використовувати тільки для зовнішнього застосування.

7.2 Не наносити на рани. Не допускати контакту із слизовими оболонками очей. Роботи із засобом рекомендовано проводити з використанням гумових рукавичках. При обробці поверхонь способом зрошення рекомендується використовувати засоби індивідуального захисту органів дихання.

7.3 При роботі із засобом не допускається перевищення встановленої норми витрати та загальної площі оброблюваних об'єктів.

7.4 Засіб легкозаймистий! Не допускати контакту з відкритим вогнем та ввімкненими нагрівальними електроприладами. Гарячим поверхням перед проведенням дезінфекції необхідно дати охолонути.

7.5 **Методи знешкодження засобу.** Після закінчення строку придатності використання засобу забороняється. У випадку розливання засобу треба засипати його негорючим адсорбентом (пісок, силікагель), та залишки змити великою кількістю води. Змив у каналізаційну систему засобу проводити тільки в розведеному стані.

ТОВ «ТІ ЕНД АЙ ПАРТНЕРИ»	Інструкція із застосування медичного виробу «Засіб дезінфекційний для медичних виробів «Медіоцид»	Ред.01	Зміна №0	Стор. 3/4
---------------------------------	--	---------------	-----------------	------------------

7.6 Загальні застереження при роботі із засобом. До роботи із засобом не допускаються особи молодші 18 років, а також особи, що мають алергічні захворювання та ушкодження шкіри. Всі роботи із засобом слід проводити у приміщенні, що добре провітрюється. Забороняється вживати їжу, пити і палити під час виконання робіт з дезінфекції. Після закінчення роботи з засобом обличчя та руки рекомендовано вимити водою з милом.

8 ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ВИПАДКОВОМУ ОТРУЄННІ

8.1 Ознаки гострого отруєння. При порушенні правил проведення робіт із засобом можуть виникнути ознаки гострого отруєння.

8.2 Заходи першої допомоги при гострому (респіраторному) отруєнні. Потерпілого необхідно звільнити від тісного одягу, вивести на відкрите повітря або в приміщення, яке добре провітрюється, прополоскати рот і ніс водою. За необхідності звернутись до лікаря.

8.3 Заходи першої допомоги при попаданні засобу в очі. При попаданні засобу в очі необхідно промити їх водою протягом 10-15 хвилин і закапати 30 % розчин сульфацилу натрію. За необхідності звернутись до лікаря.

8.4 Заходи першої допомоги при попаданні засобу до шлунку. При попаданні засобу до шлунку необхідно дати випити потерпілому кілька склянок води кімнатної температури і стимулювати блювання. Випити води з додаванням сорбенту (10-15 подрібнених таблеток активованого вугілля на склянку води), звернутись до лікаря.

9 ПАКУВАННЯ. ТРАНСПОРТУВАННЯ. ЗБЕРІГАННЯ

9.1 Пакування засобу

Засіб фасують:

– від 0,01 л (л) або кг (кг) до 25 л (л) або кг (кг) - у флакони, туби, пляшки, каністри з полімерних матеріалів, згідно з чинною нормативною документацією, які забезпечують збереження продукції;

– від 50 л (л) або кг (кг) до 200 л (л) або кг (кг) - у бочки з полімерних матеріалів, згідно з чинною нормативною документацією, які забезпечують збереження продукції.

9.2 Умови транспортування

Засіб транспортують залізничним, морським, авіаційним або автомобільним транспортом згідно з правилами перевезення відповідної категорії вантажів, що діють на даному виді транспорту.

9.3 Строки та умови зберігання

Засіб зберігають у пакуванні виробника, захищеному від світла місці, окремо від ліків, у місцях, недоступних для дітей, за температури від мінус 40 °С до плюс 35 °С.

Термін придатності засобу та гарантійний строк зберігання – 5 років з дати виготовлення.

10 ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

За показниками якості засіб повинен відповідати вимогам, вказаним в таблиці 2.

Таблиця 2. Органолептичні та фізико-хімічні показники засобу

Назва показника	Характеристика і норма
Зовнішній вигляд	Безбарвна прозора рідина
Запах	Використаної сировини
Масова частка ізопропілового спирту, %	60,0 ± 2,0

Дата випуску/останнього перегляду інструкції із застосування 05.02.2025 р.

ТОВ «ТІ ЕНД АЙ ПАРТНЕРИ»	Інструкція із застосування медичного виробу «Засіб дезінфекційний для медичних виробів «Медіоцид»	Ред.01	Зміна №0	Стор. 4/4
---------------------------------	--	---------------	-----------------	------------------

Назва показника	Характеристика і норма
Масова частка алкілдиметилбензиламоній хлориду, %	0,10 ± 0,01

11 ТЛУМАЧЕННЯ СИМВОЛІВ МАРКУВАННЯ

СИМВОЛ	Назва	СИМВОЛ	Назва
 UA.TR.098	Знак відповідності технічним регламентам з ідентифікаційним номером органу з оцінки відповідності		Ознайомитись з інструкцією із застосування
	Виробник		Увага! Дивись супровідну документацію
	Код партії		Обмеження температури
	Дата виготовлення		Берегти від прямих сонячних променів та нагрівання
	Використати до		Оберегти від вологи
	Легкозаймиста речовина		Увага! Подразлива речовина

ВИРОБНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТІ ЕНД АЙ ПАРТНЕРИ»

Код ЄДРПОУ 36758388

Юридична адреса: 01135, Україна, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 8, кімната 22.

e-mail: tov.tandi@i.ua

тел.: +38 (050) 499-75-86

www.mdmgroup.com.ua

Адреса потужностей виробництва: Україна, 08062, Київська обл., Бучанський р-н, с. Вітрівка, вул. Перемоги, 2.

Дата випуску/останнього перегляду інструкції із застосування 05.02.2025 р.